

# AcuEar Pebble

## User Manual





Model No.: PHA-126M

# Indice dei Conten

|   |    |
|---|----|
| <b>Introduzione al Prodotto (Auricolari)</b> .....  | 36 |
| Panoramica del Prodotto .....   | 36 |
| Funzione dei Tasti .....  | 37 |
| Indicatori LED.....   | 38 |
| <b>Introduzione al Prodotto (Microfono da tavolo e custodia di ricarica 2 in 1)</b> ..... | 38 |
| Panoramica del Prodotto .....   | 38 |
| Button Functions .....  | 39 |
| Indicatori LED.....   | 39 |
| <b>Ricaricare gli Auricolari e la Custodia</b> .....                                      | 40 |
| <b>Utilizzo come Auricolari TWS Bluetooth</b> .....                                       | 41 |
| <b>Utilizzo come Amplificatori Acustici con il Microfono da Tavolo</b> .....              | 42 |
| <b>Utilizzo come Auricolare Singolo</b> .....   | 44 |
| <b>Specifiche</b> .....   | 44 |
| <b>FAQ</b> .....  | 45 |
| <b>Contatti</b> .....   | 57 |

# Introduzione al Prodotto (Auricolari)

## Panoramica del Prodotto

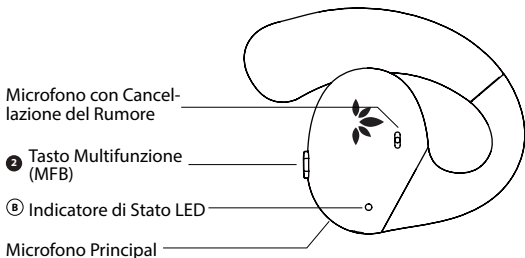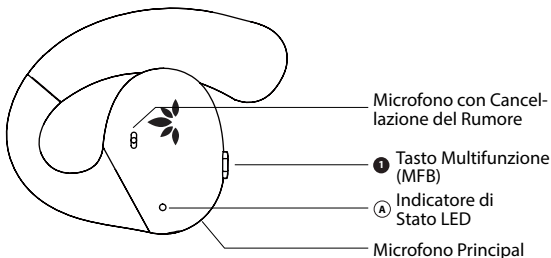

## Funzione dei Tasti


| No.                        | Tasto                             | Funzione  |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>1</b><br>or<br><b>2</b> | MFB su auricolare sinistro/destro | Tocca due volte per riprodurre/mettere in pausa   |
|                            |                                   | Tocca una volta per accettare la chiamata   |
|                            |                                   | Tocca due volte per terminare la chiamata   |
|                            |                                   | Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata  |
|                            |                                   | Tenere premuto per 5 secondi per accendere/spegnere   |
|                            |                                   | Quando si utilizza un singolo auricolare, toccare una volta per selezionare uno degli 8 livelli di volume |
| <b>1</b>                   | MFB su auricolare sinistro        | Quando utilizzi entrambi gli auricolari, tocca una volta per diminuire il volume                          |
| <b>2</b>                   | MFB su auricolare destro          | Quando utilizzi entrambi gli auricolari, tocca una volta per aumentare il volume                          |


## Indicatori LED

| No. | Indicatore & Feedback Vocale   | Stato               |
|-----|--|---------------------|
| A   | Blu fisso per 1 secondo  | Accensione          |
|     | Rosso fisso per 1 secondo poi spento   | Spegnimento         |
|     | Blu fisso per 5 secondi poi spento, indicatore vocale "CONNECTED" o "HEARING MODE" | Connesso            |
|     | Rosso fisso  | In carica           |
|     | LED spento   | Ricarica completata |
|     | Lampeggia rosso e blu alternato, indicatore vocale "PAIRING"                       | Pairing             |


## Introduzione al Prodotto (Microfono da tavolo e custodia di ricarica 2 in 1)

### Panoramica del Prodotto

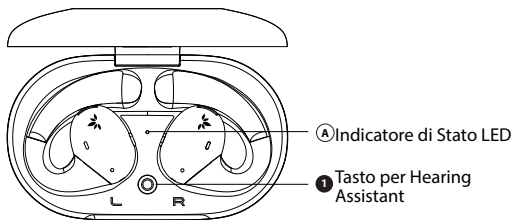

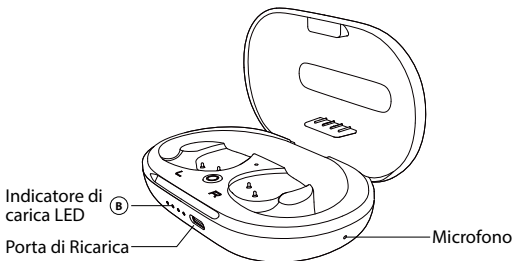

## Button Functions

| No. | Tasto   | Funzione  |
|-----|---|---|
| 1   |  | Tenere premuto per 2 secondi volta per attivare/disattivare la modalità Hear Assist (assistente Acustico) |


## Indicatori LED

| No. | Indicatori & Feedback Vocale          | Stato               |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| A   | Blu fisso                             | Hear Assist acceso  |
|     | Rosso fisso per 1 secondo poi spento  | Hear Assist spento  |
|     | Rosso e blu che lampeggiano alternati | Modalità pairing    |
| B   | Lampeggia bianco ogni secondo         | In carica           |
|     | Bianco fisso sui quattro LED          | Ricarica completata |

## Ricaricare gli Auricolari e la Custodia


### Per ricaricare gli auricolari:

Posiziona gli auricolari nella custodia e poi chiudi la custodia. Le luci LED rosse fisse sugli auricolari indicano che la ricarica è in corso; una volta spente le luci, la batteria degli auricolari sarà completamente carica.

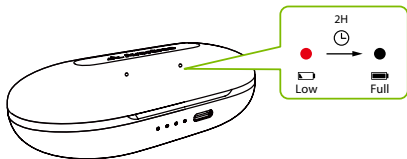

### Per ricaricare la custodia:

Se la batteria della custodia è scarica, quando la apri e poi la chiudi, i 4 LED sulla custodia lampeggeranno in bianco e dovrai ricaricarla per caricare gli auricolari. Collega il cavo di ricarica USB C, incluso nella confezione, alla porta di ricarica, quindi collegare l'altra estremità a un adattatore USB da 5V/500mA-2A (un caricabatterie del telefono o simile dovrebbero funzionare) o a una porta USB del PC.

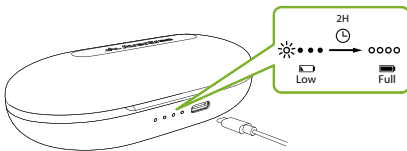


Gli indicatori LED di ricarica della custodia lampeggeranno in bianco per indicare lo stato di ricarica. A carica completa, i quattro LED diventeranno bianchi fissi.

## Utilizzo come Auricolari TWS Bluetooth

### PASSO 1

Stacca l'adesivo e inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica. Una volta rimossi dalla custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità PAIRING, indicata dal LED lampeggiante in BLU e ROSSO.

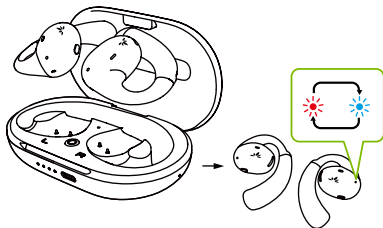

### PASSO 2

Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth.

### PASSO 3


Tieni gli auricolari vicino al dispositivo e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta collegati correttamente, l'indicatore LED di entrambi gli auricolari diventerà blu fisso per 5 secondi, quindi si spegnerà.

Per un utilizzo successivo, fare clic una volta sul pulsante MFB per riconnettersi all'ultimo dispositivo accoppiato o selezionare "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth del dispositivo.




## Utilizzo come Amplificatori Acustici con il Microfono da Tavolo

Il microfono da tavolo capta le voci dei partecipanti alla riunione e le invia direttamente nelle tue orecchie.

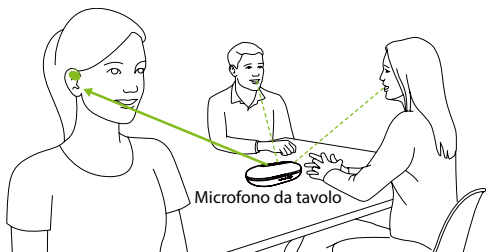

### PASSO 1


Premi a lungo il pulsante "Hear Assist" per 2 secondo sul microfono da tavolo; il microfono da tavolo entrerà in modalità ascolto, indicata dal LED che lampeggia in BLU.

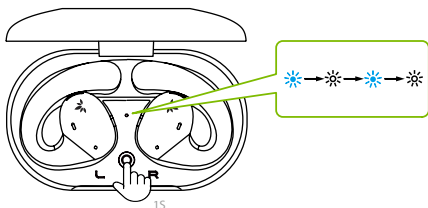

15

## PASSO 2

Attendi qualche secondo. Il microfono da tavolo e gli auricolari si collegheranno correttamente, come indicato dal LED della custodia che diventa BLU fisso.

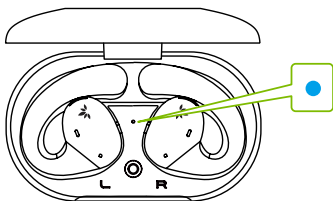

*NOTA: Il microfono generalmente funziona entro un raggio massimo di 10 metri/33 piedi dall'amplificatore acustico. Nota che la presenza di persone o di pareti possono ridurre questa distanza. Per massimizzare la portata, assicurati di poter vedere il microfono AucEar Pebble (dovrebbe essere sempre nel tuo campo visivo).*

## Passare alla Modalità Bluetooth

Tieni premuto il pulsante "Hear Assist" sul microfono da tavolo per 2 secondi per spegnerlo. Gli auricolari passeranno automaticamente alla modalità Bluetooth. Quindi puoi selezionare "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth del tuo dispositivo per connetterli.

## Utilizzo come Auricolare Singolo

Gli auricolari sinistro e destro possono essere utilizzati separatamente. Quando utilizzi un auricolare mono (singolo), puoi toccare il pulsante una volta per scegliere tra 8 livelli di volume.

## Specifiche

### Auricolari

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Versione Bluetooth                             | v5.3                          |
| Codec audio supportati                         | LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC |
| Tempo di riproduzione                          | Fino a 10 ore                 |
| Tempo di riproduzione con custodia di ricarica | Fino a 35 ore                 |
| Tempo di ricarica                              | 2 ore                         |
| Driver   | 16.5mm                        |
| Impedenza                                      | 22Ω                           |
| Peso   | 26g                           |

### Microfono da Tavolo e Custodia di Ricarica

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Versione bluetooth     | v5.3          |
| Codec audio supportati | LC3           |
| Tempo di riproduzione  | Fino a 56 ore |
| Tempo di ricarica      | 2 ore         |
| Peso                   | 78g           |

## FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

E

### **Gli auricolari non riescono a connettersi al microfono da tavolo.**

- Inserisci gli auricolari in modalità abbinamento - Inserisci gli auricolari nella custodia e disattiva il Bluetooth sul tuo cellulare. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di associazione, indicata dal LED lampeggiante in BLU e ROSSO.
- Inserisci la custodia in modalità di accoppiamento - Mentre la custodia è spenta, tieni premuto il pulsante sulla custodia per 5 secondi o finché il LED non lampeggia in BLU e ROSSO.
- Tieni insieme gli auricolari e la custodia e si collegheranno tra loro.

### **Si sente solo il suono da un auricolare/da un lato**

#### **Come regolare il volume degli auricolari?**

Puoi trovare un elenco completo delle domande frequenti su [avantree.com/support/acuear-pebble](https://avantree.com/support/acuear-pebble) o contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

# Contact Us



**Support Tickets**    [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Support Email**    [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



## Support Numbers

|    |                   |               |         |
|----|-------------------|---------------|---------|
| US | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| CA | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| UK | +44 208 068 2023  | 9am-6pm GMT   | Mon-Sat |
| DE | +49 322 2109 7297 | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| FR | +33 17 634 0312   | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| IT | +39 069 4803 330  | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| ES | +34 93 1786 261   | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| AU | +61 2 8310 9897   | 11am-7pm AEST | Mon-Fri |

---



**FAQ**    [avantree.com/support/acuear-pebble](https://avantree.com/support/acuear-pebble)

---



**Product Registration**    See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: PHA-126M

Dispose of the packaging and this product in  
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-126M-V1